

Borst Reductie Compressie Tie wrap

De Borst Reductie Compressie Tie wrap wordt steriel geleverd en is een eenvoudig product wat wordt ingezet tijdens Mamma Reducties.

Deze instelbare nylon tie wrap is voorzien van een siliconen omhulsel / slang.

De siliconenslang voorkomt het wegglijden van de tie wrap en minimaliseert weefsel beschadiging tijdens de ingreep.



Werkwijze:

Plaats de BRCT rond de basis van de borst en sluit de tie wrap.
Bind de borst af door de tie wrap verder aan te trekken.
Maak de tie wrap los door het lipje boven aan de sluiting naar achteren te trekken.

Specificaties:

BRCT standaard

Lengte Tie wrap 1,2 x 50 cm
Lengte siliconenslang 28 cm en 8x1 mm
Latex en PVC vrij
Sterilizatie: EO / enkel verpakt
Geschikt voor eenmalig gebruik
Kleur: Wit

Artikelcode: 8090102

Verpakt: 4 x 20 stuks