


REVOLUTIONAIRE FIXATIEPLEISTER VOOR CATHETERS EN DRAINS!

Deze huidvriendelijke fixatiepleister met "Clip en Lus" verbinding voorziet tijdens kort- en of langdurig gebruik in een snelle, optimale en veilige fixatie van alle catheters, drains en (centrale) lijnen. De Main-Lock fixatiepleister reduceert de tractie bij de wond en draagt het bij tot het verminderen van veel voorkomende gerelateerde catheter- en drain infecties.

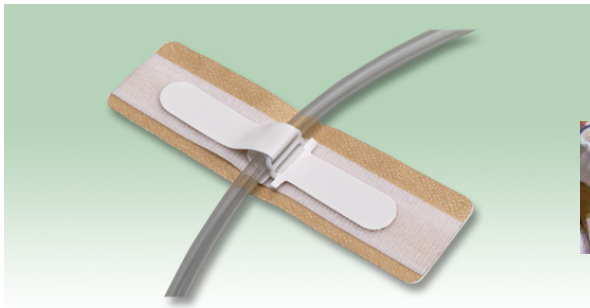

MAIN-LOCK SET BESTAAT UIT TWEE DELEN

Plakband: huidvriendelijke en ademend met een fleec oppervlak

Main-Lock: fixatie clip voor catheters, drains en andere centrale lijnen

Wat biedt MAIN-LOCK?

CORRECTE METINGEN VAN CENTRAAL VENEUZE DATA!
EENVOUDIGE, SNELLE EN BETROUWBARE FIXATIE
HUIDVRIENDELIJK
KNIKVRIJ
OPTIMALE DOORSTROMING
PIJNLOOS VOOR DE PATIENT

GESCHIKT VOOR

Catheters o.a. Centraal Venueuze Drains
Drains o.a. Thoraxdrains
Dialyse lijnen
Infuuslijnen

TIP:

Kijkt u eens op onze website voor meer informatie: www.visionmc.nl
Of bezoek onze webshop: www.visionmc-webshop.nl

Vision Medical Company B.V. - Jagersveld 12—5405 BW Uden—Tel.: 0413-820200

vision medical company



MAIN-LOCK DE FIXATIE SET VAN DE TOEKOMST

GEbruikersINSTRUCTIE

1. Reinig de huid van de patiënt en plak de Main-Lock tape erop.
2. Verwijder de roze beschermende folie van de gellaag van de fixatiepleister.
3. Plaats de catheter en of drain op de gellaag.
4. Trek vervolgens de band door het oog van de clip.
5. Fixeer vervolgens de Main-Lock fixatiepleister met de Velcro® op het fleec oppervlak.

ATTENTIE

Verwijder de fixatiepleister bij allergische reacties. Indien nodig plaats twee Main-Lock sets tijdens het fixeren van zware drains of catheters zoals bij bijv. Thoraxdrainage.

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	STUKS
90-30-20	Main-Lock set 14, 14cm x 4cm	40

Heeft u interesse of wenst u een voorbeeld te ontvangen? Neem dan even contact met ons op!
Een afspraak maken is natuurlijk ook mogelijk!

vision
medical company