







VacSax Advance

3 Liter Liners

Montage en gebruik:

Lees voor het gebruik alle instructies, let vooral goed op de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen - deze worden weergegeven met het volgende teken 

Controleer voor gebruik de expiratiedatum Deze kunt u vinden op de liner en het label op de doos.

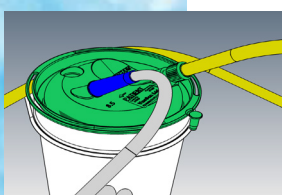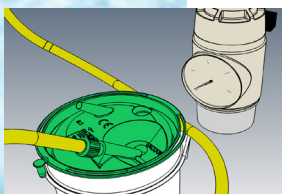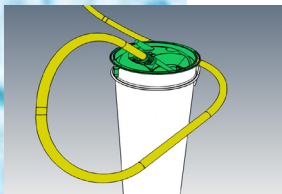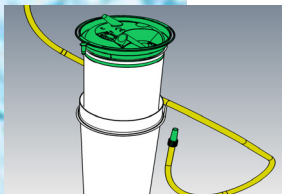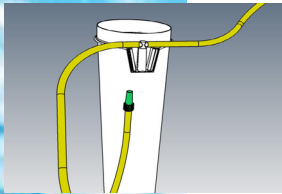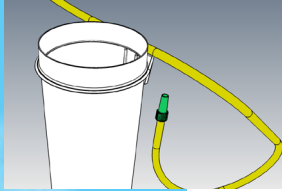

1. Zorg dat de harde cannister schoon is - veeg indien nodig de binnenkant af met een vochtige doek.



2. Als u de 3 liter liner gaat gebruiken zorg er dan voor dat u de juiste slangenset gebruikt, artikelcode 9910-353 voor een enkele liner en code 9910-357 voor een setup van twee liners.

3. Plaats de liner in de cannister en druk deze stevig aan. Controleer of dat de patiëntpoort naar voren wijst om het aansluiten te vereenvoudigen.



4. **Zorg dat de groene taper connector van de vacuümslangenset goed is gemonteerd - als dit niet gebeurt kan dit leiden tot cross connectie.**

5. **Sluit de liner met het groene deksel aan op de vacuüm klok, als dit niet gebeurt kan het leiden tot een verontreiniging van het ziekenhuis vacuümsysteem.**

6. Draai de vacuüm klok op maximaal; sluit de groene taper connector met een vinger af en zet nu het vacuüm aan zodat de liner zich ontplooid. Zodra de liner volledig is ontplooid wordt het vacuüm op de juiste waarde voor het gebruik ingesteld.

7. Plaats nu de groene taper connector van de vacuümslang op het deksel van de liner. Sluit nu de patiëntslang aan op de patiëntpoort. Controleer deze connectie goed.



8. **CONTROLE VOOR GEBRUIK:** controleer het vacuüm op de slang van de patiënt, houdt de vinger op het uiteinde. Controleer visueel of dat de liner volledig is opgeblazen.

Zorg dat het deksel schoon blijft volgens de ziekenhuis procedure.

Na gebruik:



Draag handschoenen

Belangrijk! draai het vacuüm niet dicht tijdens het loskoppelen van de patiëntenslang, als het systeem overvult zou zijn zouden vloeistoffen kunnen terugvloeien in de patiëntenslang!

9. Verwijder de patiëntenslang en plaats nu de stopper (zie deksel) in de lege patiëntpoort.

10. Verwijder de vacuümconnectie en til de liners m.b.t. hendels uit de cannister.

Verwijs naar de instructies voor de disposables



Deze instructies moeten samen met de bijgevoegde Vacsax instructies worden gelezen. Verwijder de slangenset alleen als deze gecontamineerd is.

NOTE: wanneer een liner geïnstalleerd is controleer dan met regelmaat het vacuüm en de flow. Controleer voor de ingebruikname de expiratiedatum. Deze kunt u vinden op de liner en op de verpakking.



ISO: 9001 REGISTERED
ISO 13485 REGISTERED



Conform to
93/42EEC Medical
devices directive



Single use



Belangrijke
informatie



Latex vrij



Verpakking
100 % Recyclebaar