

Please read through both sides of these instructions thoroughly before using the VacSax cascade system.

# Closed Disposable Suction System

## INSTRUCTIONS FOR USE CASCADE SYSTEM

1. Met het VacSax Cascade systeem kunnen tot maximaal acht liners in serie worden aangesloten met een maximum capaciteit tot 24 liter.

Trolleys in 5 varianten:

- 9910-338-2V 500mm trolley
- 9910-339-2V 750mm trolley
- 9910-224-4V 1200mm trolley
- 9910-225-8V 1200mm trolley
- 9910-232-8V Heavy Duty trolley



2. Sluit de vacuümslang aan op het vacuüm en sluit vervolgens de blauwe connector aan op de vacuümpoort op het de witte deksel van de eerste liner. Gebruik VacSax cascade slangen(4310-021) en Verbind de patiëntpoort (=witte deksel) met de vacuümpoort van de eerste blauwe cascade liner. Vervolgens wordt de patiëntpoort van de eerste blauwe deksel met de vacuümpoort van de volgende verbonden enz. totdat alle liners verbonden zijn. Een witte deksel dient altijd direct op de vacuümpoort te worden aangesloten. Als er gewerkt wordt met een Heavy Duty trolley moet de liners met het witte deksel op de laagste positie worden geplaatst.

### VOOR GEBRUIK

3. (I) Controleer of dat alle liners goed in de houders zitten.
- (II) Controleer alle slangen of dat deze goed bevestigd zijn op de patiënt- en vacuüm poorten.
- (III) Zet vacuüm op het systeem en controleer deze.
- (IV) Als Heavy Duty trolley wordt gebruikt, controleer dan of dat alle kranenblokken open staan. Maar als er een cannister niet wordt gebruikt sluit dan het kranenblok van deze cannister.

### AFVAL

4. Begin met de blauwe deksel waaraan de patiëntslang is aangesloten. Met het vacuüm er nog op verwijder de patiëntslang en sluit de connector op het deksel af met de gele stopper. Verwijder vervolgens de blauwe connector uit de vacuümpoort en sluit af deze met de lange gele stopper. Ga naar de volgende liner, verwijder de groene connector van het cascade systeem van de patiëntpoort en sluit af met de kleine gele stopper. Verwijder vervolgens weer de blauwe connector en sluit af met de lange gele stopper. Ga zo door totdat alle liners zijn losgekoppeld. Sluit het vacuüm af en verwijder de liners uit de cannisters.

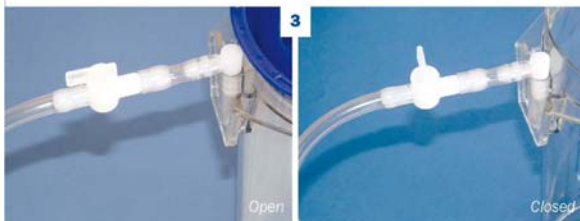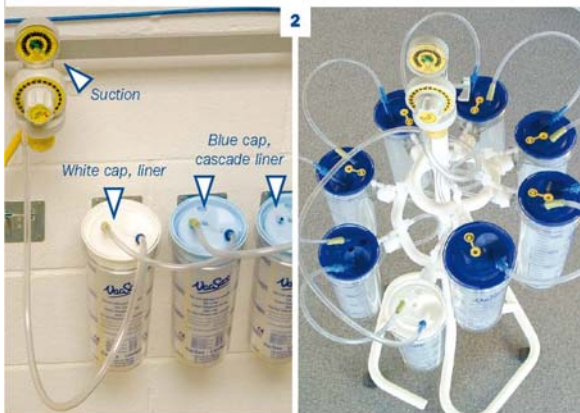

VacSax limited, Western Wood Way  
Langage Science Park, Plymouth, PL7 5 BG, UK  
T. +44(0)1752 33700 F. +44(0)1752 33760  
www.vacsax.com



All liners manufactured by VacSax are made from High Density PE and do not contain any PVC and produce only carbon dioxide and water upon 100% combustion helping to save the environment.

Every effort has been made to ensure the accuracy of information contained within this literature. However freedom from errors and omissions cannot be guaranteed. VacSax policy is one of continual product improvement. The company reserves the right to change the information contained herein without prior notice.

'Our commitment is to quality.'