




Gebruiksaanwijzing Navelstrenging

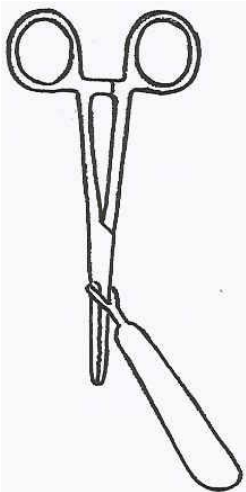


Steek de klem door het gaatje aan de navelstrenging. Knijp met een andere klem de navelstreng dicht bij de moeder.

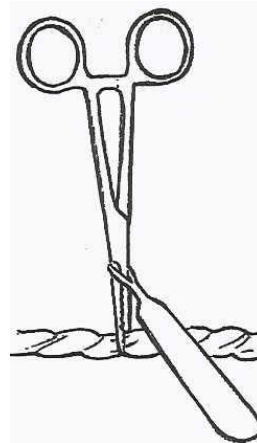


Knijp met de klem, waar de navelstrenging omheen zit, de navelstreng dicht bij de baby. Zorg ervoor dat de navelstreng volledig tussen de tanden van de klem zit.

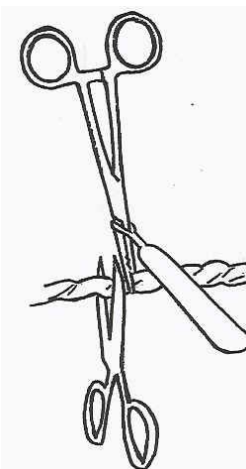


Knip de navelstreng door langs de kant van de moeder en sluit de klem waar de navelstrenging omheen zit.

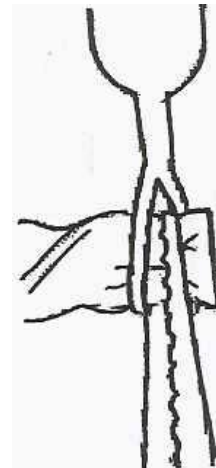

Neem de navelstrenging bij het lange gedeelte en trek hem van de klem over de navelstreng heen.

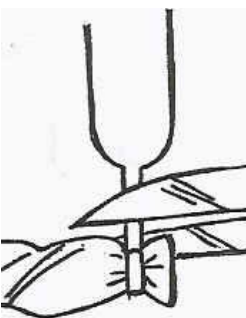

Knip het lange gedeelte van de navelstrenging af, dicht bij de navelstreng.

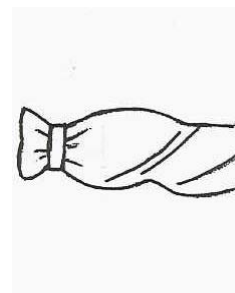

Klaar

Latex vrije variant REF 9607S

Contactgegevens leverancier:
Vision Medical Company BV

Vluchtoord 3A
5406 XP Uden
Tel. 0413 820 200
Email. info@visionmc.nl



Latex variant REF 9607

