

# URIMETER 500

## GEBRUIKERSINSTRUCTIE

### URIMETER 500

Een gesloten urine opvangsysteem!

Gebruik het systeem niet als de verpakking beschadigd of open is!



1. Hang het systeem op aan de rode bandjes. (1)
2. Sluit de aftapkraan (2) en het ventiel. (3)
3. Sluit de connector van de slang aan op de catheter.
4. Controleer deze aansluiting voor gebruik.
5. Procedure legen van een urinezak:
  - sluit de aftapkraan (2)
  - open vervolgens het ventiel (3)
6. Draag altijd handschoenen.
7. Voorkom knikken in de slang.
8. Sluit de schuifklem op de slang tijdens:
  - het aansluiten van de catheter
  - monsternamen
  - transport van de patiënt
9. Hang de Urimeter niet hoger op, dan de blaashoogte.

Meetnauwkeurigheid is circa 10%

**DENK AAN HET VENTIEL!**  
**SLUIT DIT VENTIEL VOOR GEBRUIK !**



vision  
medical company