

# Novo-Pad

## Tracheostomie kompres

Novo-Pad is een erg zacht, huidvriendelijke en absorberend verband.



Novo-Pad is beschikbaar in een maat::

Novo-Pad REF 70 – 10  
8,5 cm x 8,5 cm



Deze tracheostomie kompres is latex-vrij, bevat géén lijm of kleefstoffen en is voorzien van een hydrofiel en adsorberende foam gemaakt van polyurethaan.

Als toevoeging op de goede kompres karakteristiek van dit zachte materiaal voorziet het bovendien in een optimale opname van vocht.

Het geabsorbeerde vocht wordt over het gehele kompres verdeeld, zodat de huid rond de wond niet geïrriteerd raakt.

De huidgekleurde laag van het kompres is bovendien semi-permeabel en ten gevolge hiervan goed ventilerend. Beetje bij beetje wordt hierdoor het geabsorbeerde vocht, op het oppervlak van de niet-doorlaatbare laag verwijderd.

Novo-Pad kan eenvoudig verwijderd worden omdat deze foam niet aan de wond kleeft.

Novo-Pad voorziet in een gereguleerde vochtige omgeving rond de wond, voorkomt irritaties en biedt u en de patiënt een moderne en optimale wond verzorging.

### Toepassing

1. Open de steriele verpakking.
2. Verwijder de papier laag van het bovenste deel van het kompres.
3. Breng het kompres met de witte zijde op de huid en rond de canule aan.  
De gekartelde snede voorkomt dat de kompres van zijn plaats schuift.