

VacSax Advance

1 LITER LINERS

VACSAX ADVANCE EEN TOTAAL PAKKET LINERS

GEBRUIKSINSTRUCTIES LINERS

Het aansluiten en het gebruik:

Lees voor gebruik alle instructies, met speciale aandacht voor de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- deze zijn als volgt aangegeven



Controleer voor het gebruik de expiratedatum, deze kunt u vinden op de liner en op de bijsluiter

- 1 Zorg ervoor dat de cannister schoon is voor gebruik, indien nodig maak deze schoon met een vochtige doek. **Gebruik de juiste maat cannister per type liner**
- 2 Haal de liner uit de doos
- 3 Plaats de liner in de harde cannister met de patiëntpoort naar voren en druk deze goed aan
- 4 Plaats nu de groene connector van de vacuümslang in de vacuümpoort (1) van de liner. Doe dit met een draaiende en drukkende beweging
- 5 Sluit de patiëntslang aan op de patiëntpoort (2). Draai vervolgens de vacuümklok **Maximaal** open en stel deze vervolgens in op de gewenste waarde



6 Controleer voor gebruik:

Het vacuüm op de patiëntslang, door deze aan het uiteinde even af te sluiten



Wordt de liner klaargezet maar niet direct gebruikt, dek deze dan af volgens hygiëne protocol van het ziekenhuis

Na gebruik:

Draag handschoenen



Belangrijk: schakel tijdens het loskoppelen van de patiëntslang het vacuüm niet uit. Als het systeem overvult is bestaat nl. de kans op backflow in de patiëntslang



- 7 Verwijder de patiëntslang en plaats de stopconnector (op de rand van de deksel) op de patiëntpoort
- 8 Verwijder de vacuümslang en til de liner m.b.v. de hendels uit de cannister



Het verwijderen van afval

Volg hiervoor de ziekenhuis- en leveranciers richtlijnen

Note: vervang de liner na 24 uur gebruik om een maximaal vacuüm te garanderen

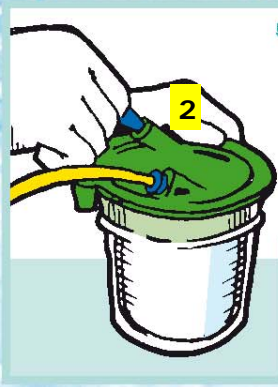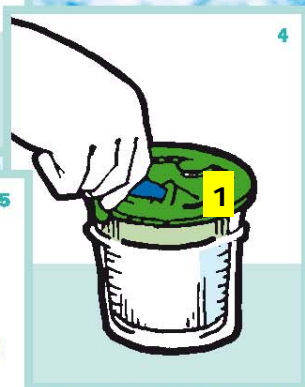

VacSax®

VacSax Limited, Western Wood Way,
Langage Science Park, Plymouth, PL7 5BG, UK.
T: +44 (0)1752 337000 F: +44 (0)1752 337600

www.vacsax.com

