

Clinell Detergent Wipes

Effectieve reiniging, laat geen strepen na.

Ontwikkeld voor de dagelijkse reiniging van oppervlakken en apparatuur in zorgomgevingen. Clinell Detergent Wipes combineren gebruiksgemak met een geavanceerde, gepatenteerde formule voor een grondige en consistente reiniging, met minimale residuvorming.



Detergent Wipes

Waar geavanceerde technologie en eenvoud samenkomen in een bijzonder krachtige formule.

Gepatenteerde formule

De formule zorgt voor een effectieve vuilverwijdering met vrijwel geen strepen of resten op oppervlakken, zelfs bij frequente reiniging.

Optimale reiniging

Krachtige reinigingswerking, geschikt voor frequent gebruik in zorgomgevingen.

Handig en effectief

Gebruiksklare wegwerpdoekjes voor algemene reiniging en vochtig afstoffen, zonder voorbereiding of verdunning.

Geschikt voor meerdere oppervlakken en apparatuur

Te gebruiken op algemene oppervlakken en niet-invasieve medische apparatuur.

Toepassingen

(Voorbeelden van gebruik - dit is geen volledige lijst).

Oppervlakken

- Matrassen
- Stoelen
- Bedsponden
- Vensterbanken
- Tafelbladen
- Onderzoekstafels
- Bureaus

Apparatuur

- Telefoons
- Rolstoelen
- Toetsenborden
- Trolleys
- Accessoires
- Looprekken

Optimale reiniging

Reinigingsdoekjes voor diverse oppervlakken, voor een superieure reiniging en vochtig afstoffen.

Clinell Detergent Wipes zijn ontwikkeld voor een effectieve dagelijkse reiniging van diverse oppervlakken en vochtig afstoffen in zorgomgevingen.

In tegenstelling tot traditionele reinigingsproducten op basis van oliën en fosfaten, laten deze doekjes vrijwel geen residu achter, wat vlekvorming beperkt en bijdraagt aan een schoon eindresultaat.

De gepatenteerde formule bevat oppervlakte actieve stoffen die de oppervlaktespanning verlagen en vuil effectief losmaken.

Clinell reinigingsdoekjes bevatten geen alcohol of ontsmettingsmiddelen, zijn zeer veilig in gebruik en zijn deels vervaardigd uit duurzame plantaardige bronnen.

Hoe maak je oppervlakken doeltreffend schoon?




Was of ontsmet de handen en trek voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan indien het lokaal protocol dit voorschrijft. Voor het product zelf dient men geen handschoenen te dragen.



Neem één doekje uit de verpakking.



Reinig van boven naar beneden, van schoon naar vuil, en veeg in een S-vormig patroon. Veeg geen twee keer over dezelfde zone en gebruik 1 doekje per oppervlak. Laat het oppervlak drogen aan de lucht.

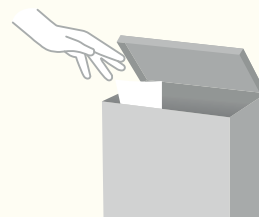

Vervang het doekje als het droog of vuil wordt en gooi het weg.

Bestelinformatie

	PRODUCTOMSCHRIJVING	VERPAKKING	ARTIKEL
	Detergent Wipes 215	Verpakking van 215 stuks	CDW215
	Witte wanddispenser	(Voor CDW215)	CDWD

clinell® Detergent Wipes




Belangrijke aandachtspunten bij het gebruik van Clinell Detergent Wipes

- 1** Gebruik Clinell Detergent Wipes voor de algemene reiniging van oppervlakken en het afnemen van stof.
- 2** Bevat een gepatenteerde formule die speciaal ontworpen is voor gebruik in zorgomgevingen waar het beperken van microbiële contaminatie essentieel is.
- 3** Clinell Detergent Wipes hebben een biologisch afbreekbare samenstelling met ingrediënten afkomstig uit plantaardige bronnen.
- 4** Pluisvrije doekjes, laten geen strepen na en getest op materiaalcompatibiliteit.
- 5** Clinell Detergent Wipes zijn alcoholvrij.
- 6** Clinell Detergent Wipes verwijderen vuil en micro-organismen door de combinatie van het reinigingsmiddel en mechanische wrijving.
- 7** Sluit de verpakking wanneer deze niet in gebruik is. Het stevige klepdeksel zorgt ervoor dat de doekjes gebruiksklaar bewaard blijven.
- 8** Bewaar bij voorkeur de verpakking rechtop zodat het detergent gelijkmatig verdeeld blijft over de doekjes en uitdrogen vermeden wordt. Maak gebruik van dispensers op de plaats van gebruik.
- 9** Reinig nooit meer dan één oppervlak met één doekje. Vervang het doekje als het droog of vuil wordt en gooi het weg.
- 10** Volg altijd de 5 principes van reiniging:



Veeg in een
S-vormig patroon

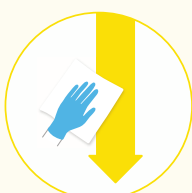


Werk van boven
naar beneden



Veeg van
schoon naar
vuil



Veeg geen twee
keer over hetzelfde
oppervlak

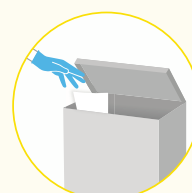

Gebruik 1 doekje
per oppervlak.

Volg altijd de reinigingsprocedures en richtlijnen van de fabrikant van medische apparatuur.

gama
healthcare

Verdeler Nederland GAMA Healthcare

vision medical company

Vision Medical Company
Vluchtoord 3a
5406 XP Uden, Nederland
T: +31 (0) 413 820 200
E: info@visionmc.nl
W: visionmc.nl

Invoerder Benelux GAMA Healthcare

dialex
BIOMEDICA

Dialex Biomedica NV
Caetsbeekstraat 1
3740 Bilzen-Hoeselt, België
T: +32 (0) 89 41 71 40
E: info@dialexbiomedica.be
W: dialexbiomedica.be

GHA250347

2026-0577/04