

# CLINELL UNIVERSAL PRODUCTBROCHURE

**Vision Medical Company**  
Vluchtoord 3a  
5406 XP Uden  
Nederland  
Tel.: +31 (0)413 820 200

[www.visionmc.nl](http://www.visionmc.nl)  
[info@visionmc.nl](mailto:info@visionmc.nl)

# REINIGING EN DESINFECTIE VAN OPPERVLAKKEN IN ÉÉN STAP

Doeltreffend, veilig en gebruiksvriendelijk  
met Clinell Universal Wipes en Spray.

Unieke en gepatenteerde samenstelling  
zonder alcohol.

Clinell Universal Wipes zijn alcoholvrije reinigings- en desinfectiedoekjes voor niet-invasieve medische hulpmiddelen (CE), algemene oppervlakken (biocide PT2), oppervlakken die in contact komen met voeding (biocide PT4) en zelfs voor handen (biocide PT1), die in één handeling zowel vuil verwijderen als een breed spectrum aan micro-organismen uitschakelen en resistentievorming voorkomen. Dankzij de korte contacttijd worden minstens 99,99% van de ziektekiemen effectief gedood. Clinell Universal Wipes bevatten een synergetische combinatie van meerdere actieve bestanddelen (biociden) met verschillende werkingsmechanismen in combinatie met Polyquat. De doekjes hebben een uitstekende materiaalcompatibiliteit en zijn gebruiksvriendelijk in elke omgeving.

Deze aanpak draagt bij aan een consistente infectiepreventie en ondersteunt een verantwoord gebruik van desinfectiemiddelen.



Clinell Universal Wipes (200)



Informeer bij Dialex Biomedica  
naar uw gratis dispensers.


## Belangrijkste voordelen




- 2 in 1 werking: reinigen én desinfecteren in één stap.




- Snelle contacttijd: werkzaam vanaf 10 seconden (afhankelijk van het micro-organisme en de toepasselijke EN-norm).

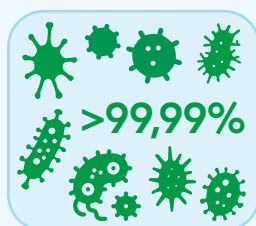

- Breed antimicrobieel spectrum: bactericide, virucide, fungicide en mycobactericide werking.

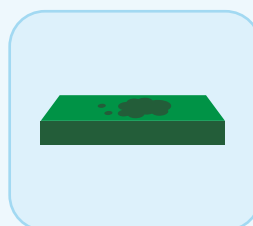

- Getest onder vuile omstandigheden volgens relevante EN normen.

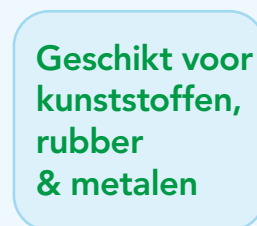

- Uitstekende materiaal-compatibiliteit.



- Gebruiksklaar: geen verdunning, geen mengfouten.



- Huidvriendelijk: dermatologisch getest en geen handschoenen nodig voor gebruik.



- Veilig in gebruik, geen gevarenaanduidingen.



- Sterk, pluisvrij en scheurvast doekje voor optimale verdeling.



- Gratis bijhorende dispensers.

## Ontwikkeld voor infectiepreventie

Clinell Universal Wipes zijn ontwikkeld om omgevingsdecontaminatie eenvoudiger, sneller en consistent te maken in zorginstellingen. Door twee stappen te combineren in één product ondersteunen ze een betere naleving van reinigings- en desinfectieprotocollen.

De doekjes zijn geschikt voor routinematig gebruik tussen patiënten en dragen bij aan het beperken van de overdracht van ziekenhuisgerelateerde infecties.

# Antimicrobiële werkzaamheid

## Testresultaten en behaalde EN-normeringen

De werkzaamheid van de doekjes werd telkens getest met de vloeistof die uit het doekje wordt geperst, onder vuile omstandigheden, conform de meest recente Europese normen.

Werkzaam tegen o.a.:

- Grampositieve bacteriën (o.a. Staphylococcus aureus, MRSA, Enterokokken, VRE).
- Gramnegatieve bacteriën (o.a. E. coli, Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella).
- Mycobacteriën (o.a. Mycobacterium bovis, tuberculosis, terrae).
- Gisten en schimmels (o.a. Candida albicans, auris).
- Virussen – omhuld en niet omhuld (o.a. Adenovirus, Norovirus, Influenza, SARS CoV 2, Hepatitis B en C, Papillomavirus, Rotavirus, Vaccinia virus).

Typische normen: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615, EN 16777.

Een gedetailleerde werkzaamheidstabel is beschikbaar op aanvraag.

## Contacttijd

De contacttijd is de tijd die een ontsmettingsmiddel nodig heeft om in contact te zijn met een micro-organisme om het te doden. Als van een ontsmettingsmiddel beweerd wordt dat het in 1 minuut 99,99 % van de MRSA kan doden, moet het bacterieoppervlak gedurende minstens 1 minuut zichtbaar nat zijn om deze bacterie te kunnen doden. Daarom is het bij het gebruik van ontsmettende doekjes belangrijk om het oppervlak natuurlijk aan de lucht te laten drogen en nooit af te drogen. Onrealistische contacttijden resulteren in onpraktische producten die in realistische omstandigheden mogelijk niet doeltreffend zijn. De fabrikant voert nauwkeurige testen uit met Clinell om te garanderen dat alle contacttijden en beweringen om micro-organismen te doden in realistische omstandigheden haalbaar zijn.

## Voornaamste klinische studies

Clinell producten zijn ontwikkeld om te werken. Daarom werden ze getest in realistische omstandigheden en contacttijden. De doeltreffendheid werd, naast de laboratoriumtesten, tevens bevestigd in klinische studies zoals:

### CLEEN-study



### Birmingham-study

Het Queen Elizabeth University Hospital Birmingham, een groot universitair ziekenhuis in het VK, heeft een klinische studie uitgevoerd met Clinell Universal Wipes dat resulteerde in een vermindering van 55% van MRSA-infecties na implementatie in hun ziekenhuis.

# Materiaalcompatibiliteit

Clinell Universal Wipes en Spray zijn uitgebreid getest op materiaalcompatibiliteit om veilig gebruik in klinische omgevingen te garanderen. Onafhankelijke testen volgens internationaal erkende normen (o.a. ISO 22088 – Environmental Stress Cracking en ASTM G31 – corrosietesten) tonen aan dat Clinell Universal compatibel is met de meest gebruikte kunststoffen, rubbers en metalen in medische hulpmiddelen en ziekenhuisomgevingen.

Tijdens deze testen werden geen zichtbare wijzigingen, geen spanningsscheuren, geen corrosie en geen verzwakking van mechanische eigenschappen vastgesteld bij correct gebruik. Hierdoor zijn Clinell Universal producten geschikt voor routinematige reiniging en desinfectie van gevoelige medische apparatuur en oppervlakken.

Een gedetailleerd overzicht van de geteste materialen is beschikbaar op aanvraag.


## Toepassingen

Dankzij de doeltreffende, maar zachte formulering zijn Clinell Universal Wipes geschikt voor niet invasieve medische hulpmiddelen, voor algemene oppervlakken en oppervlakken die in contact komen met voeding (en zelfs voor de handen), zonder risico op schade bij correct gebruik. Onderstaande toepassingen zijn voorbeelden maar geen volledige lijst.

- Ultrasonische transducers
- Zuurstofsaturatiemeters
- Doppler sondes
- Stethoscopen
- ECG apparatuur
- Incubators
- Bloeddrukmeters
- Radiologie apparatuur
- Bloeddrukmeter en -manchet
- Monitors
- Deurklink
- Lichtschakelaar
- Bedsponden en matras
- Infuus pomp en staander
- Thermometer
- Rolstoel, looprek
- Behandelingstafel, brancard
- Telefoon en afstandsbediening
- Stoel, nachtkastje en bijzettafel
- Sanitair (kranen, toiletbril en doorspoelknop)

## Hoe maak je oppervlakken doeltreffend schoon?


Het dragen van handschoenen is niet vereist voor gebruik van het product (wel bij bloed of lichaamsvochten en kans op besmetting).

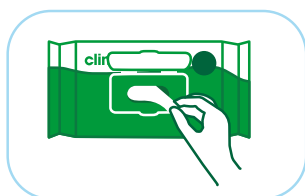


- Neem een doekje uit de verpakking.



- Vertrek van schoon naar vervuild oppervlak en veeg in een S-vorm. Veeg niet 2 keer over dezelfde zone.

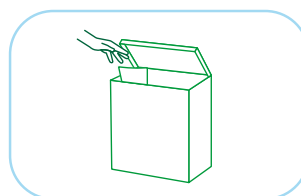

- Gebruik één doekje per oppervlak. Vervang het doekje als het droog of vuil wordt en gooi het weg.

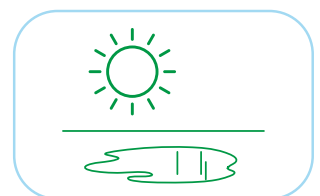

- Laat het oppervlak drogen aan de lucht.

# Dispenser

Iedere muurhouder voor de doekjes wordt standaard voorzien met de volgende 4 stickers:

- De gebruikstoepassingen (zijkant)
- De gebruiksaanwijzing (zijkant)
- Geen babydoekje (voorkant)
- Niet doorspoelen (voorkant)



## clinell®

### Gebruiksaanwijzing Doekjes

Neem een doekje uit de verpakking.


Vertrek van schoon naar vervuild oppervlak en veeg in een S-vorm.

Veeg niet 2 keer over dezelfde zone.

Gebruik één doekje per oppervlak.

Vervang het doekje als het droog of vuil wordt en gooi het weg.

Laat het oppervlak drogen aan de lucht.

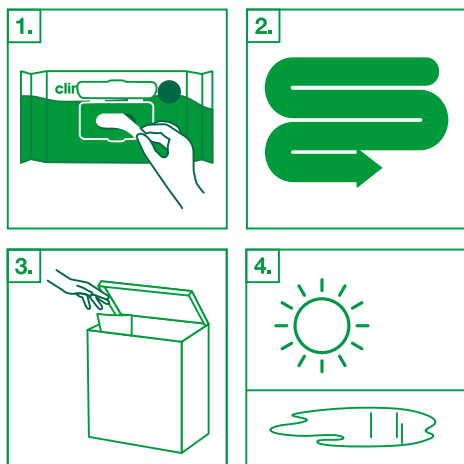

De volgende materialen/oppervlakken moeten regelmatig gereinigd en ontsmet worden met deze doekjes: (enkele voorbeelden uit de praktijk; dit is echter geen alomvattende lijst)



### kamer



### directe omgeving



### medisch




### elders

JBN210645



## Hoe de dispenser opvullen?

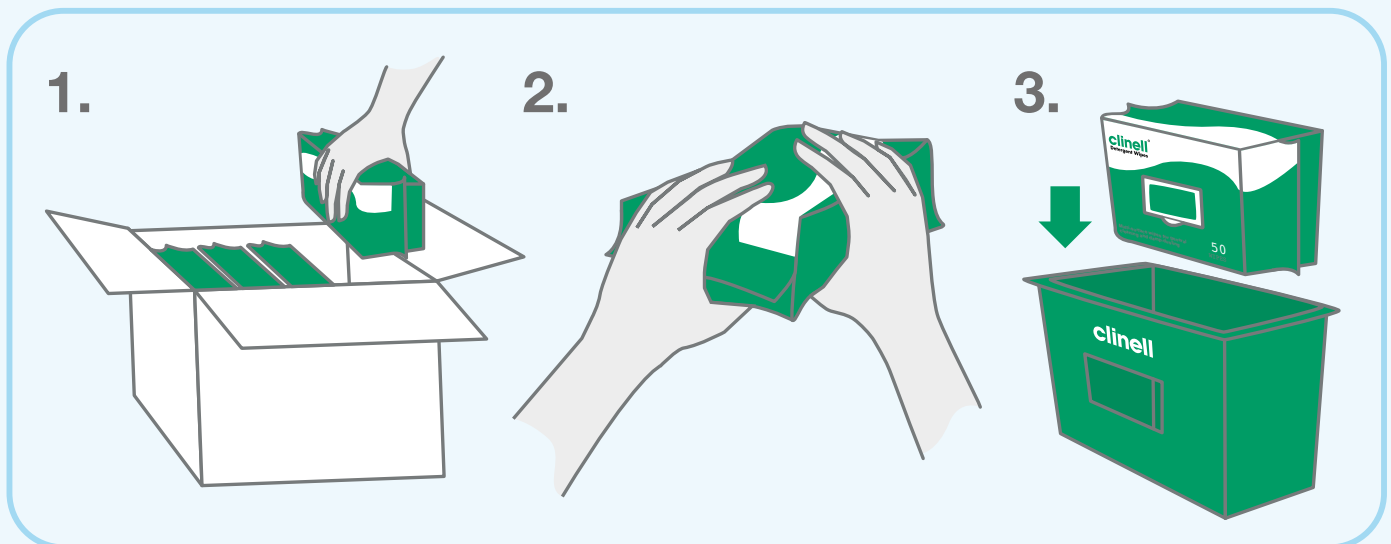

1. Neem de verpakking uit de doos.

2. Druk overal op de verpakking om het vocht gelijkmatig te verdelen.

3. Plaats de verpakking op haar zijkant in de houder met de openingsdeksel naar buiten.

Het is aangewezen om de verpakking CW200NL in een houder te plaatsen om zo een optimale en stabiele werking te verkrijgen (het vocht zal op deze manier gelijkmatig verdeeld worden en de doekjes allen even vochtig houden).

## Clipverpakking (CWCP50)

De geïntegreerde clip in onze gekende klepdeksel-verpakking is versterkt en in hoekvorm, zodat hij stevig genoeg is (zie hierlangs) en goed past op infuusstaanders, bloeddrukmeters, patiëntenstoelen, bedkaders, monitorstandaarden, verpleegkarren, wagentjes en heel wat andere apparaten.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Clinell Universal Wipes (200)

Clinell Universal Wipes Clipverpakking (50)

Dispenser voor CW200NL

### VERPAKKING

Verpakking van 200 doekjes (22 x 27,5 cm)

Doos: 6 x 200

Pallet: 360 x 200

Verpakking van 50 doekjes (20 x 20 cm)

Doos: 24 x 50

Pallet: 1.080 x 50

### ARTIKEL

CW200NL

CWCP50

CWD

## Waarom kiezen voor Clinell Universal Wipes?

1. Multifunctioneel doekje voor algemene oppervlakken (biocide PT2), medische hulpmiddelen (CE), oppervlakken die in contact komen met voeding (biocide PT4) en zelfs geschikt voor handontsmetting (biocide PT1).
2. Reinigt en desinfecteert in één stap.
3. Breed werkingsspectrum met korte contacttijden vanaf 10 seconden (afhankelijk van het micro-organisme), EN normeringen behaald in dirty conditions (<> clean conditions).
4. Alcoholvrij.
5. Dermatologisch getest en huidvriendelijk.
6. Geen handschoenen nodig bij gebruik van Universal Wipes.
7. Veilig in gebruik: geen gevarenclassificatie, niet ontvlambaar, niet-corrosief.
8. Compatibel met gevoelige materialen zoals kunststof, plexiglas, rubber, metaal, inox.
9. Sterk, pluisvrij en scheurvast doekje dat het desinfectiemiddel gelijkmatig op het oppervlak verdeelt.
10. Aangename geur.
11. Minder afval door dunner doekjes.
12. Minder afval door de grotere verpakking van 200 doekjes.
13. Kostenbesparend door de grotere verpakking van 200 doekjes.
14. Verpakking met hersluitbaar klepdeksel.
15. Doekjes komen gemakkelijk één voor één uit de verpakking (voorkomt verspilling).
16. Houdbaarheid van 6 maanden na opening (mogelijkheid om aan te duiden op verpakking).
17. Bijhorende dispenser maakt het product overal makkelijk beschikbaar (patiëntenkamer/point of care, utility, verpleegwacht, onderzoekslokaal, fysiotherapie lokaal, enz.).
18. Verschillende verpakkingsopties voor specifieke toepassingen en situaties (verpleegkarren, OK, Speed, IZ, ...).
19. Zelfde product ook beschikbaar in sprayfles van 750 ml d.w.z. geen procedurefouten en gecombineerd gebruik mogelijk.
20. Bewezen effectiviteit in de praktijk door klinische studies, wereldwijde referentie en sterke marktleiderspositie in België.

Maak ook gebruik van:

## EvaluCleen™ Snel en eenvoudig evaluatie-instrument

### Het meest geavanceerde systeem voor het evalueren van omgevingshygiëne.

**Fluorescerende markers zijn een betere methode dan ATP om te beoordelen hoe grondig een oppervlak werd afgeveegd en weerspiegelen de microbiologische belasting beter dan ATP<sup>1</sup>.**

Het gebruik van een fluorescerend markersysteem op de intensieve zorg leidde tot een verbetering van de reiniging van oppervlakken met 40%<sup>2</sup>.



**clinell**™  
SURFACE

1. Rutala, Gergen, Sickbert-Bennett, Huslage, Weber. Comparison of Four Methods to Assess Cleanliness. APIC Presentation, June 2013.  
<http://disinfectionandsterilization.org/files/2012/12/NewTechAPIC13.ppt>

2. Carling PC, Parry MF, Bruno-Murtha LA, Dick B. Improving environmental hygiene in 27 intensive care units to decrease multidrug-resistant bacterial transmission. Crit Care Med. 2010 Apr;38(4):1054-9.

# CLINELL UNIVERSAL SPRAY

Clinell Universal Spray is een alcoholvrij reinigings- en desinfectiemiddel in schuimvorm voor niet-invasieve medische hulpmiddelen (CE), algemene oppervlakken (biocide PT2) en oppervlakken die in contact komen met voeding (biocide PT4).

Het verwijdt in één handeling vuil en schakelt een breed spectrum aan micro-organismen uit. Dankzij de korte contacttijd worden minstens 99,99% van de ziektekiemen effectief gedood.

De krachtige combinatie van meerdere werkzame bestanddelen (biociden) en Polyquat zorgt voor een synergetisch effect en een optimale antimicrobiële werking. De spray is eenvoudig aan te brengen op grotere oppervlakken, heeft een uitstekende materiaalcompatibiliteit en is gebruiksvriendelijk in elke omgeving.




## Gebruiksaanwijzing

Het dragen van handschoenen is niet nodig voor gebruik van het product (wel bij bloed of lichaamsvloeistoffen en kans op besmetting).



1. Knippen en draaien om mondstuk te openen.

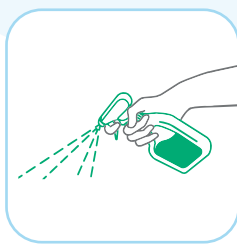


2. Trek aan de handgreep en spray in het doekje of gelijkmatig op het oppervlak.



3. Vertrek van schoon naar vervuild oppervlak en veeg in een S-vorm. Veeg niet twee keer over dezelfde zone.



4. Sluit het mondstuk. Gooi het doekje weg.

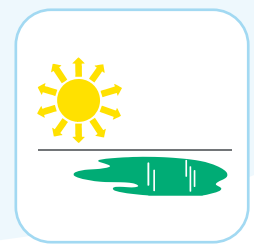

5. Laat het oppervlak drogen aan de lucht.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Clinell Universal Spray (750 ml)

### VERPAKKING

Fles van 750 ml  
Doos: 12 x 750 ml  
Pallet: 576 x 750 ml

### ARTIKEL

CDS750NL

## Waarom kiezen voor Clinell Universal Spray?

1. Multifunctionele spray voor algemene oppervlakken (biocide PT2), oppervlakken die in contact komen met voeding (biocide PT4) en medische hulpmiddelen (CE).
2. Reinigt en desinfecteert in één stap.
3. Breed werkingsspectrum met korte contacttijden vanaf 10 seconden (afhankelijk van het micro-organisme), EN normeringen behaald in dirty conditions (<> clean conditions).
4. Alcoholvrij.
5. Dermatologisch getest en huidvriendelijk.
6. Geen handschoenen nodig bij gebruik van Universal Spray.
7. Veilig in gebruik: geen gevarenclassificatie, niet ontvlambaar, niet-corrosief.
8. Compatibel met gevoelige materialen zoals kunststof, plexiglas, rubber, metaal, inox.
9. In schuimvorm zonder verneveling waardoor het vrijkomen van aerosol uitgesloten is.
10. Ingebouwd doseringssysteem waarbij pomp/schuimkop niet van de fles verwijderd kan worden (security locked).
11. Aangename neutrale geur.
12. Houdbaarheid van 6 maanden na opening.
13. Zelfde product ook beschikbaar in verpakkingen van 200 doekjes d.w.z. geen procedurefouten en gecombineerd gebruik mogelijk.
14. Bewezen effectiviteit in de praktijk door klinische studies, wereldwijde referentie en sterke marktleiderspositie in België.

# Wetenschappelijke onderbouw en referenties:

## Oppervlakken en medische hulpmiddelen zijn gecontamineerd, en kunnen doeltreffend ontsmet worden met geïmpregneerde wipes

- Als zorgmedewerkers high touch oppervlakken ontsmetten met wegwerpdoekjes vermindert de microbiële besmetting en duurt dit effect tot 6,5 uur langer dan klassieke reiniging door een schoonmaakploeg.  
B. Casini et al., "Improving cleaning and disinfection of high-touch surfaces in intensive care during carbapenem-resistant acinetobacter baumannii endemo-epidemic situations," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 15, no. 10, 2018, doi: 10.3390/ijerph15102305.
- Decontaminatie van bloeddrukmanchetten vermindert de microbiële besmetting waardoor dure en ecologisch onverantwoorde wegwerpmanchetten overbodig worden.  
P. A. Zimmerman, M. Browne, and D. Rowland, "Instilling a culture of cleaning: Effectiveness of decontamination practices on non-disposable sphygmomanometer cuffs," *Journal of Infection Prevention*, vol. 19, no. 6, pp. 294–299, Nov. 2018, doi: 10.1177/1757177418780997.

## Effectieve ontsmetting van medische hulpmiddelen bespaart kosten.

- In de CLEEN studie werden procedures voor reiniging en desinfectie van gedeelde medische apparatuur aangepast, met extra reinigingsuren, scholing, audits en feedback van de staff. De kosten verminderden met AUS\$ 642.010 per 1.000 patiënten, in vergelijking met een controlegroep waar de klassieke procedures werden uitgevoerd.  
D. Brain et al., "Economic Evaluation of Enhanced Cleaning and Disinfection of Shared Medical Equipment," *JAMA Network Open*, vol. 8, no. 4, Apr. 2025, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.8565.

## Geïmpregneerde wipes verhogen de compliance bij reiniging- en ontsmettingsprocedures:

- Het dagelijks gebruik van geïmpregneerde wipes ipv de traditionele ontsmetting met chloor verminderde oppervlaktecontaminatie op significante wijze.  
H. Siani, R. Wesgate, and J. Y. Maillard, "Impact of antimicrobial wipes compared with hypochlorite solution on environmental surface contamination in a health care setting: A double-crossover study," *American Journal of Infection Control*, vol. 46, no. 10, pp. 1180–1187, Oct. 2018, doi: 10.1016/j.ajic.2018.03.020.
- Het gebruik van reinigingsdoekjes leidde tot een betere naleving en betere aanvaarding van de schoonmaakprotocollen.  
E. T. Martin et al., "150. Cleaning High Touch Surfaces of Patients' Rooms: Make It Easier, and It Simply Gets Cleaner A Safer, More Effective Method for Cleaning and Disinfecting GI Endoscopic Procedure Rooms." [Online]. Available: [https://academic.oup.com/ofid/article/5/suppl\\_1/S346/5207799](https://academic.oup.com/ofid/article/5/suppl_1/S346/5207799).

## Effectieve ontsmetting van oppervlakken en medische hulpmiddelen met geïmpregneerde wipes vermindert het aantal infecties.

- De introductie van een universeel desinfectiedoekje op alle afdelingen van een groot academisch ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk liet de incidentie van MRSA-infecties per 100.000 patiëntendagen significant afnemen (van 20,7 naar 9,4 per 100.000 patiëntendagen;  $p < 0,005$ ).  
M. I. Garvey, M. A. C. Wilkinson, C. W. Bradley, K. L. Holden, and E. Holden, "Wiping out MRSA: Effect of introducing a universal disinfection wipe in a large UK teaching hospital," *Antimicrobial Resistance and Infection Control*, vol. 7, no. 1, Dec. 2018, doi: 10.1186/s13756-018-0445-7.
- De gerandomiseerde, gecontroleerde CLEEN clusterstudie toonde aan dat een multimodale reinigingsaanpak, inclusief 3 extra uren per dag voor gedeelde medische apparatuur, met continue scholing, controle en feedback het aantal zorggerelateerde infecties met 34,5% deed verminderen.  
K. Browne et al., "Investigating the effect of enhanced cleaning and disinfection of shared medical equipment on health-care-associated infections (CLEEN): a stepped-wedge, cluster randomised, controlled trial," 2024, doi: 10.1016/S1473-3099(24)00399-2.

## Referenties:

- Garvey MI, Wilkinson MAC, Bradley CW, Holden KL, Holden E. Wiping out MRSA: effect of introducing a universal disinfection wipe in a large UK teaching hospital. *Antimicrob Resist Infect Control*. 2018;7:155.
- Otter JA, Burgess P, Davies F, Mookerjee S, Singleton J, Gilchrist M, Parsons D, Brannigan ET, Robotham J, Holmes AH. Counting the cost of an outbreak of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: an economic evaluation from a hospital perspective. *Clin Microbiol Infect*. 2017 Mar;23(3):188-196.
- Guest JF, Keating T, Gould D, et al. Modelling the annual NHS costs and outcomes attributable to healthcare-associated infections in England. *BMJ Open* 2020;10:e033367.
- World Health Organization. Antimicrobial Resistance. World Health Organization. Published November 21, 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>.
- Infection Prevention and Control of Epidemic- and Pandemic-Prone Acute Respiratory Infections in Health Care. Geneva: World Health Organization; 2014.
- Jenkins EK, Silman F, Gosden PE. Sharps Tray Cleaning after use - A completed audit cycle. *J Clin Audit*. 2012; 4(3).
- Zimmerman P-A, Browne M, Rowland D. Instilling a culture of cleaning: Effectiveness of decontamination practices on non-disposable sphygmomanometer cuffs. *J Infect Prev*. 2018;19(6):294-299.
- Shepherd E, Leitch A, Curran E. Infection Prevention and Control Team NHS Lanarkshire. A quality improvement project to standardise decontamination procedures in a single NHS board in Scotland. *J Infect Prev*. 2020;21(6):241-246.
- Casini B, Righi A, De Feo N, et al. Improving Cleaning and Disinfection of High-Touch Surfaces in Intensive Care during Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Endemo-Epidemic Situations. *Int J Environ Res Public Health*. 2018;15(10):2305.
- Martin ET, Dadon M, Lazarovitch T, Saadon H, Maya T, Jaffe K, Moscovich S, Zaidenstein R, Marchaim D. 1150. Cleaning High Touch Surfaces of Patients' Rooms: Make It Easier, and It Simply Gets Cleaner. *Open Forum Infect Dis*. 2018 Nov 26;5(Suppl 1):S346.
- Bloss R, Meyer S, Kampf G. Adsorption of active ingredients of surface disinfectants depends on the type of fabric used for surface treatment. *J Hosp Infect*. 2010 May;75(1):56-61.
- Chang F, Lin C, Lee C. A comparison of 1000ppm Chlorine and single-use detergent/disinfectant wipes for decontamination of a clinical environment contaminated with Vancomycin-resistant Enterococci. *Journal of Infection Prevention*. 2017;18(15):S14.
- Browne K, White NM, Russo PL, et al. Investigating the effect of enhanced cleaning and disinfection of shared medical equipment on health-care-associated infections in Australia (CLEEN): a stepped-wedge, randomised cluster, controlled trial. *Lancet Infect Dis*. Published online August 13, 2024. doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00399-2.

# ONTDEK OOK ENKELE VAN ONZE ANDERE CLINELL PRODUCTEN

**Clinell Peracetic Acid Wipes** op basis van perazijnzuur bieden high-level desinfectie en zijn doeltreffend tegen biofilm, sporen en resistente micro-organismen.

**Clinell Hexi Hub** desinfecteert katheterhubs en toegangspoorten volgens internationale infectiepreventierichtlijnen met chloorhexidine 2% in alcohol 70% en helpen zo kathetergerelateerde infecties effectief te voorkomen.

**Rediair** is een compacte, stille en mobiele luchtreiniger met HEPA H14-filtratie die de luchtkwaliteit in zorgomgevingen actief verbetert. Hierdoor ontstaat een veiligere omgeving voor patiënten én zorgmedewerkers. Een krachtige extra barrière in de strijd tegen luchtgedragen ziektekiemen.



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Clinell Peracetic Acid Wipes

Clinell Hexi Hub

Clinell Rediair

## VERPAKKING

verpakking van 25 doekjes

verpakking van 240 doekjes

per stuk

## ARTIKEL

CS25

CA2C240

RAIREU

**gama**  
healthcare

Verdeler Nederland GAMA Healthcare

**vision** medical company

Vision Medical Company  
Vluchtoord 3a  
5406 XP Uden, Nederland  
T: +31 (0) 413 820 200  
E: [info@visionmc.nl](mailto:info@visionmc.nl)  
W: [visionmc.nl](http://visionmc.nl)

Invoerder Benelux GAMA Healthcare

**dialex**  
BIOMEDICA

Dialex Biomedica NV  
Caetsbeekstraat 1  
3740 Bilzen-Hoeselt, België  
T: +32 (0) 89 41 71 40  
E: [info@dialexbiomedica.be](mailto:info@dialexbiomedica.be)  
W: [dialexbiomedica.be](http://dialexbiomedica.be)